



# Travel Scoot<sup>®</sup> Extensión Asiento

## Instrucciones

### ¡Atención!

Cuanto más alto sea el asiento, mayor será el riesgo de volcar en carreteras irregulares, por lo tanto, esta extensión sólo debe utilizarse en caso de extrema urgencia, hay que tener en cuenta que se debe de manejar con precaución.



1.) Afloje la abrazadera, pero déjela puesta

2.) Afloje y retire el tornillo



3.) Saque el tubo de asiento original e introduzca el nuevo tubo más largo de forma que el orificio esté alineado con la rosca del 2.

4.) Vuelva a colocar y apriete el tornillo



5.) Deslice las 3 piezas espaciadoras sobre el tubo y fíjelas con un poco de pegamento o cinta adhesiva para evitar que se caigan al retirar el asiento.