



ravelScoot[®] Seggiolino di rialzo

Istruzioni

Attenzione!

Più alto è il sedile, maggiore è il rischio di ribaltamento su strade sconnesse. Pertanto, questo seggiolino deve essere utilizzato solo in caso di estrema urgenza e lo stile di guida deve essere adattato in modo difensivo.



1.) Allentare il morsetto, ma lasciarlo inserito

2.) Allentare e rimuovere la vite



3.) Estrarre il tubo sella originale e inserire il nuovo tubo più lungo in modo che il foro sia allineato con la filettatura del punto 2.

4.) Rimettere e stringere la vite



5.) Far scorrere tutti e tre i manicotti distanziatori sul tubo e fissarli con un po' di colla o nastro adesivo per evitare che cadano quando si rimuove il sedile.